

## 1 SW とパソコンをつなぐ

### 「1 SW 用変換ソフト」の設定方法

- 1 .「dnw1sw10.exe」自己解凍型ファイルを解凍すると「1SW 用変換ソフト」というフォルダができます。
- 2 .「できマウス。」とスイッチを接続してください。スイッチは、必ず「できマウス。」の1番プラグにつないでください。
- 3 .「できマウス。」及びスイッチをパソコンに接続してから「1SW 用変換ソフト」立ち上げて下さい。(順序が逆だと「できマウス。」を認識できません)  
したがって、スタートアップに「1SW 用変換ソフト」を入れて使う場合には、まず「できマウス。」を接続してから、パソコンを立ち上げる必要があります。
- 4 . 1 でできたフォルダ中の「3Dfpl02.exe」をダブルクリックして起動してください。



図 1

ここでエラーが発生した場合、お使いの OS に合わせて「Win2000.bat」か「Win98.bat」をダブルクリックしてください。「dinput8.dll」という同一フォルダ内にファイルができます。(隠しファイルになっています)

OS が Win2000、XP、NT の場合 「Win2000.bat」をクリック

OS が Win95、98、ME の場合 「Win98.bat」をクリック

この後、再度「3Dfpl02.exe」をダブルクリックして起動してください。





図 5

「できマウス。」を先に接続してあれば、上記操作は導入時のみ必要で、以降は「1SW 用変換ソフト」を起動するだけで動作します。

以上で 1SW 用変換ソフトの設定は終了です。

スタートアップに「1SW 用変換ソフト」を入れてお使いになることをお勧めします。